



Dr Patrick MURA
Chef de Pôle
☎ : 05 49 44 39 23
patrick.mura@chu-poitiers.fr

**Dosage des protéines Tau, Phospho-Tau et
peptides Bêta-amyloïdes dans le LCR**
Demande externe au CHU de Poitiers

**SERVICE D'IMMUNOLOGIE
ET INFLAMMATION**

Pr Jean-Claude LECRON
Chef de Service
☎ : 05 49 44 34 27
jean-claude.lecron@chu-poitiers.fr

**UF 7740 : LABORATOIRE
D'INFLAMMATION,
ALLERGIE et CYTOKINES**

Anne BEAUME
PH
☎ : 05 49 44 34 29
anne.cravero@chu-poitiers.fr

Fabienne WITTHUHN
PH
☎ : 05 49 44 34 31
fabienne.witthuhn@chu-poitiers.fr

Florence JACOMET
PH
☎ : 05 49 44 34 37
florence.jacomet@chu-poitiers.fr

Florence MARECHAL
Cadre de Santé
☎ 05 49 44 42 27
florence.marechal@chu-poitiers.fr

➤ **Consignes pré-analytiques :**

- Prélever un tube **polypropylène** (réf. ex : Starstedt 62.610.201 10 mL ou LABCON 3136-345-008 15 mL) environ 1,5 mL de LCR, à garder verticalement si possible.
- **Transport** de l'échantillon au laboratoire et **centrifugation** (+4°C) 2000 g 10 minutes en moins de **2 H** si possible (max. 4H).
- Distribuer 500µL en 3 tubes polypropylène (réf. : Starstedt 72.706 ou 72.730.006) et congeler aussitôt à -20°C ou -80°C.

➤ **Suivi pré-analytique :**

Prélèvements :

Date :Heure :

Réception du tube au laboratoire expéditeur :

Date :Heure :

Aspect du LCR:.....

Aliquotage et congélation :

Date :Heure :

Température de conservation :

Envoi :

Date :Heure :

Réception du prélèvement au CHU de Poitiers:

Date :Heure :

Température de conservation :

Etiquette patient

Prescripteur
